

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO DELLE MASCHERINE FFP2 - FFP3

**1. PRIMA DI INDOSSARE LE MASCHERINE DEVI LAVARE LE MANI CON ACQUA E SAPONE (CON CURA, PER ALMENO 40 SECONDI) POI SCIACQUARE E ASCIUGARE
OPPURE
DEVI MASSAGGIARE LE MANI CON UN GEL LAVAMANI FINO A QUANDO TORNANO ASCIUTTE**

2. MODELLA LA BANDA METALLICA SULLA MASCHERINA E APPOGGIALA SUL NASO FACENDOLA ADERIRE BENE POI POSIZIONA GLI ELASTICI DIETRO ALLE ORECCHIE FAI ATTENZIONE CHE LA MASCHERINA COPRA BENE NASO E BOCCA E ARRIVI FIN SOTTO AL MENTO; MENTRE LA INDOSSI NON TOCCARE MAI LA PARTE FRONTALE DELLA MASCHERINA E NON ABBASSARLA MAI SOTTO IL NASO O SOTTO LA BOCCA

3. PER RIMUOVERE LA MASCHERINA PRENDILA DAGLI ELASTICI E BUTTALA IN UN SACCHETTO CHE DOVRA' ESSERE CHIUSO E DEPOSITATO NELLA RACCOLTA INDIFFERENZIATA

4. ALLA FINE DELLE OPERAZIONI LAVA DI NUOVO LE MANI CON ACQUA E SAPONE OPPURE GEL LAVAMANI

**5. PER RIUTILIZZARE UNA MASCHERINA USATA (MAX 6 UTILIZZI) DEVI SPRUZZARLA SIA DALL'INTERNO CHE DALL'ESTERNO CON ALCOOL A 70 GRADI E LASCIARLA ASCIUGARE (APPESA)
QUANDO ASCIUTTA RIPONILA IN UN SACCHETTO O IN UNA SCATOLA IN MODO CHE NON PRENDA POLVERE**

FONTI: ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA', MINISTERO DELLA SALUTE

www.who.it www.salute.gov.it

